

# EXCLUSIVO WF KIT EXTRATOR DE PARAFUSOS

O NOSSO KIT POSSIBILITA UMA EXTRAÇÃO CONTROLADA DE UM PARAFUSO FRAGMENTADO SEM A CABEÇA SOMENTE COM A ROSCA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO IMPLANTE.

SEGUIE INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES DO KIT E SUAS FINALIDADES DE USO;




## UM SISTEMA SIMPLES E EFICIENTE!!!


O sistema do KIT EXTRATOR DE PARAFUSOS é simples para compreensão e muito eficiente em seu uso, porém antes iniciar qualquer procedimento, é necessário analisar a compatibilidade das nossas guias de perfuração com o seu implante.

Para possibilitar a análise de compatibilidade da guia com a plataforma do seu implante, segue na próxima página as medidas dimensionais das nossas guias. Agora você precisa ter as medidas da plataforma do seu implante e verificar se é compatível ou não.

Tendo visto que no kit existe uma guia totalmente compatível com a plataforma do seu implante, pode-se iniciar o procedimento de remoção;

**Primeiro passo,** você irá conectar na chave de apoio a guia compatível com o seu implante. Com a guia conectada na chave você irá conectá-la na interface do implante, certificando-se que foi feito um encaixe perfeito, sem nenhuma instabilidade, pois a guia precisa estar bem firme e não balançar para que se faça uma perfuração guiada perfeita.

**Segundo passo,** você vai conectar no contra ângulo uma das brocas de preparação. Em seguida configurar o seu motor cirúrgico em aproximadamente 1.500rpm em rotação reversa , é importante usar irrigação para o preparo do furo. Após tudo configurado você irá passar a broca por dentro da guia conectada na plataforma do implante, com a broca girando em sentido anti-horário e com irrigação, assim iniciando o preparo do furo. A perfuração deverá ser feita de forma gradativa, com movimento pulsante, aliviando a broca sempre que necessário e observando se a furação está evoluindo (profundidade ideal é de 2,5mm a 4.0mm). Após realizada a perfuração com profundidade suficiente para travar o mini retractor, vamos para o próximo passo...


**Terceiro passo,** nessa etapa você poderá retirar a guia da plataforma do implante e levará somente o extrator de parafuso - mini retractor até o núcleo perfurado, assim conectando a sua ponta ao pequeno fragmento. Em seguida é necessário girar o extrator no sentido anti-horário  para que seja travado ao fragmento e possa o desrosquear da parte interna do implante. Dependendo da pressão que o fragmento estiver travado é necessário utilizar um torquímetro cirúrgico para exercer um contra torque mais forte.

Segue imagem mostrando a guia conectada na chave de apoio e a broca de preparação passando por dentro da guia.



COMPONENTES

# KIT EXTRATOR DE PARAFUSOS

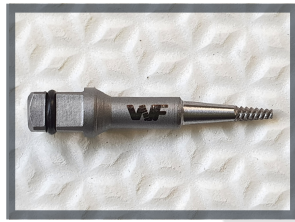

### EXTRATOR DE PARAFUSO - MINI RETRIVER

FUNÇÃO: DESROSQUEAR O PEQUENO FRAGMENTO DE PARAFUSO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO IMPLANTE.

O FORMATO CÔNICO E CORTANTE PERMITE QUE A PONTA TRAVE COM FACILIDADE NO NÚCLEO DO PEQUENO FRAGMENTO.




**DIMENSÕES DA PONTA CORTANTE**  
DIÂMETRO SUPERIOR: 1,65MM  
DIÂMETRO INFERIOR: 1,0MM



### CHAVE DE APOIO

FUNÇÃO: APOIAR E ESTABILIZAR A GUIA DE PERFURAÇÃO CONECTADA NA PLATAFORMA DO IMPLANTE  
USO: MANUAL  
LARGURA DO TOPO: 7,4MM  
COMPRIMENTO TOTAL: 70MM

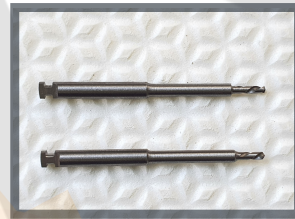

### BROCA DE PREPARAÇÃO 02 UNIDADES

FUNÇÃO: FAZER UM FURO CENTRAL NO FRAGMENTO DE PARAFUSO.


AS DUAS BROCAS TEM A MESMA MEDIDA.



DIREÇÃO DE CORTE: ANTI-HORÁRIO  
ROTAÇÃO: 1.500 A 2.000RPM  
USAR COM IRRIGAÇÃO

DIÂMETRO DA PONTA: 1,0MM  
ALTURA DA PONTA CORTANTE: 5,0MM  
COMPRIMENTO TOTAL DA BROCA: 32MM

AMARELO

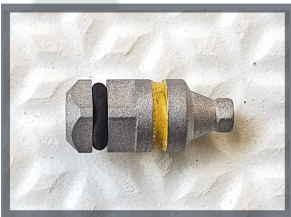

### GUIA DE PERFURAÇÃO PLATAFORMA CONE MORSE E HEX INTERNO

NORMALMENTE COMPATÍVEL COM PLATAFORMAS DE IMPLANTES CONE MORSE COM HEXÁGONO INTERNO.  
MEDIDAS INDICADAS: 3.0, 3.3 E 3.5

A GUIA TEM UM CORPO CÔNICO COM UM HEXÁGONO EXTERNO NA PONTA.




ANGULAÇÃO: 21°  
ALTURA: 2,0MM



DIÂMETRO: 2,2MM  
ALTURA: 1,0MM

AZUL

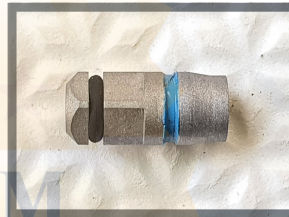

### GUIA DE PERFURAÇÃO PLATAFORMA HEX EXTERNO


NORMALMENTE COMPATÍVEL COM IMPLANTES REGULARES DE PLATAFORMAS HEXÁGONO EXTERNO.  
MEDIDAS INDICADAS: 4.8, 5.0 E 5.5

A GUIA TEM UM HEXÁGONO INTERNO NA PONTA.



DIÂMETRO: 3,3MM  
ALTURA: 1,5MM

VERDE

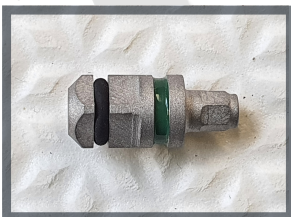

### GUIA DE PERFURAÇÃO PLATAFORMA CONE MORSE E HEX INTERNO

NORMALMENTE COMPATÍVEL COM PLATAFORMAS DE IMPLANTES CONE MORSE E HEXÁGONO INTERNO  
MEDIDAS: 3.75, 4.0 E 4.1

A GUIA TEM UM CORPO CILÍNDRICO COM UM HEXÁGONO EXTERNO NA PONTA.




DIÂMETRO: 2,5MM  
ALTURA: 3,8MM



DIÂMETRO: 2,65MM  
ALTURA: 1,5MM

ROXO

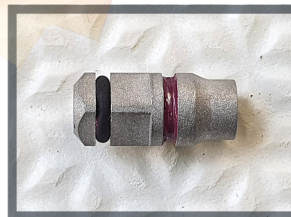


### GUIA DE PERFURAÇÃO PLATAFORMA HEX EXTERNO

NORMALMENTE COMPATÍVEL COM IMPLANTES REGULARES DE PLATAFORMAS HEXÁGONO EXTERNO.  
MEDIDAS: 3.75, 4.0, 4.1 E 4.5

A GUIA TEM UM HEXÁGONO INTERNO NA PONTA.

LARANJA

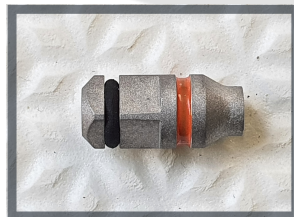

### GUIA DE PERFURAÇÃO PLATAFORMA HEX EXTERNO

NORMALMENTE COMPATÍVEL COM IMPLANTES REGULARES DE PLATAFORMAS HEXÁGONO EXTERNO.  
MEDIDAS INDICADAS: 3.0 E 3.5

A GUIA TEM UM HEXÁGONO INTERNO NA PONTA.



DIÂMETRO: 2,4MM  
ALTURA: 1,5MM

